

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用肛肠吻合器及配件	
注册人名称	江苏康赛医疗器械科技有限公司	
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先 <input type="checkbox"/> 应急
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请	
结构特征	<input type="checkbox"/> 有源 <input checked="" type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	吻合器： C-ZW-A32 I、C-ZW-A32 II、C-ZW-A32III、C-ZW-A34 I、C-ZW-A34 II、C-ZW-A34III C-ZW-A36 I、C-ZW-A36 II、C-ZW-A36III C-ZW-B32 I、C-ZW-B32 II、C-ZW-B32III、C-ZW-B34 I、C-ZW-B34 II、C-ZW-B34III C-ZW-B36 I、C-ZW-B36 II、C-ZW-B36III 附件： C-PR-32 I、C-PR-32 II、C-PR-32III、C-PR-34 I、C-PR-34 II、C-PR-34III	
主要组成成分	一次性使用肛肠吻合器及配件(A型)由抵钉座、保护盖、吻合组件外壳、保险钮、活动手柄外壳、固定手柄、调节螺母、垫刀圈、两排钉仓、环形刀和吻合钉组成，一次性使用肛肠吻合器及配件(B型)由抵钉座、保护盖、吻合组件外壳、保险钮、活动手柄外壳、固定手柄、调节螺母、垫刀圈、三排钉仓、环形刀和吻合钉组成，附件I型由窥视套、支撑套、肛塞和钩线棒组成，附件II型由单孔镜管、双孔镜管、三孔镜管和镜芯组成，附件III型由窥视套、支撑套、肛塞、钩线棒、单孔镜管、双孔镜管、三孔镜管和镜芯组成。	

	该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
适用范围/预期用途	适用于齿状线上粘膜选择性切除。
产品储存条件及有效期	略
分类编码	02-13
注册人住所	靖江市靖城建安村（鑫源路2号）3幢
生产地址	靖江市靖城建安村（鑫源路2号）3幢
同类产品及其既往注册情况	
该产品为拟上市注册。同类产品有无锡市神康医疗器械设备有限公司的一次性肛肠吻合器及配件(苏械注准 20202020886)	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>（一）原理：一次性使用肛肠吻合器及配件通过机械传动装置将预先放置在组件中，呈二排或三排互相平行错位排列的吻合钉击入已经对合好、需要吻合在一起的组织内，吻合钉在穿过两层组织后受到前方抵钉座的阻挡，向内弯曲，形成“B”形互相错位排列，将两层组织永久性钉合在一起。</p> <p>（二）生物学评价：跟人体组织接触，符合生物学评价的要求。</p> <p>（三）灭菌工艺： 该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。</p> <p>（四）临床评价： 该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性肛肠吻合器及配件进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。</p> <p>（五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：陕西省医疗器械质量检验院，报告编号 W2022Q0268；合肥熠品医药科技有限公司，2024HF0086-CN	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
<p>本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。</p> <p><input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他。</p>	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械

	<input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册