

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用输卵管造影导管		
注册人名称	安骏生物医疗科技（苏州）有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 （有源/无源）	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 （体外诊断试剂）	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	AJ-SLG-3Fr(1mm)、AJ-SLG-4Fr(1.3mm)、AJ-SLG-5Fr(1.7mm)、AJ-SLG-6Fr(2.0mm)		
主要组成成分	一次性使用输卵管造影导管由球囊导管、导引管、疏通管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		
适用范围/预期用途	通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	18-01		
注册人住所	江苏省苏州市太仓市浮桥镇银港路 52 号 11 号楼 201 室		
生产地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇银港路 52 号 11 号楼 201 室		
同类产品该产品既往注册情况			
该产品拟上市注册，参考的同类产品注册证编号为闽械注准 20202180485。			
有关产品安全性、有效性主要评价内容			

（一）原理：一次性使用输卵管造影导管利用导引管将柔韧的球囊导管导入子宫，然后通过气阀向套囊注入生理盐水充起球囊，使球囊导管不会脱出，然后通过通液口注入造影液以观察输卵管通畅情况，再通过疏通管建立疏通通道，将堵塞的输卵管进行疏通。 （二）生物学评价：该产品与组织接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺：该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性使用输卵管造影导管进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：威科检测集团有限公司，报告编号 WT233026(更)、WT243581。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册