

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性直线切割吻合器及组件	
注册人名称	常州威克医疗器械有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	吻合器： VSLC60B、VSLC60G、VSLC80B、VSLC80G、VSLC100B、VSLC100G、VPSLC60B、VPSLC60G、VPSLC80B、VPSLC80G、VPSLC100B、VPSLC100G 组件： VLCR60B、VLCR60G、VLCR80B、VLCR80G、VLCR100B、VLCR100G、VPLCR60B、VPLCR60G、VPLCR80B、VPLCR80G、VPLCR100B、VPLCR100G	
主要组成成分	一次性直线切割吻合器及组件根据外形和手柄结构不同可分为 VSLC、VPSLC 两种型式。每种型式的吻合器和钉仓组件根据吻合长度分为三种规格，根据吻合钉高度分为两种尺寸。VSLC 型直线切割吻合器及组件由推进手柄、上固定手柄、抵钉座、按钮、活动手柄罩、钉仓固定架、切割刀、钉仓、吻合钉组成。VPSLC 型直线切割吻合器及组件由推进手柄、上固定手柄、切割刀、抵钉座、活动手柄罩、钉仓固定架、钉仓、吻合钉组成。一次性直线切割吻合器在出厂时每把切割吻合器选配 1 个钉仓组件。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。	
适用范围/预期用	适用于消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。	

途	
产品储存条件及有效期	不适用
分类编码	02-13
注册人住所	常州西太湖科技产业园长扬路 24-4 号
生产地址	常州西太湖科技产业园长扬路 24-4 号 C 栋
同类产品及该产品既往注册情况	
该产品为拟上市注册。同类产品有常州威克医疗器械有限公司的一次性直线切割吻合器及组件（苏械注准 20172020057）	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：吻合器通过机械传动装置，将预先放置在组件中呈四排互相平行错位排列的吻合钉，击入已经对合好需要吻合在一起的组织内，吻合钉在穿过组织后受到前方钉砧阻挡，向内弯曲，形成类“B”形互相错位排列，将组织吻合在一起。 （二）生物学评价：跟人体组织接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺： 该产品采用辐照灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价： 该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性直线切割吻合器及组件进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：江苏飞凡检测认证有限公司，FLY-R-2024-00107Amd01、FLY-R-2024-00108Amd01	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
适用范围和禁忌证、产品风险管理资料、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、产品说明书已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：	
☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿

	☐参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐其他（专项方案等）
检查结论	☐通过核查 ☐未通过核查，建议不予注册 ☒整改后通过核查 ☐整改后未通过核查，建议不予注册